


GUIDE DE MESURE OPTIKAM SANS DISPOSITIF DE POSTURE

1

Activer le mode de mesure *Sans Dispositif de Posture*

Le mode *Sans Dispositif de Posture* vous permet de capturer les mesures de DP et de hauteurs sans utiliser l'appareil de posture.



Appuyez pour sélectionner le mode de mesure *Sans Dispositif de Posture*.

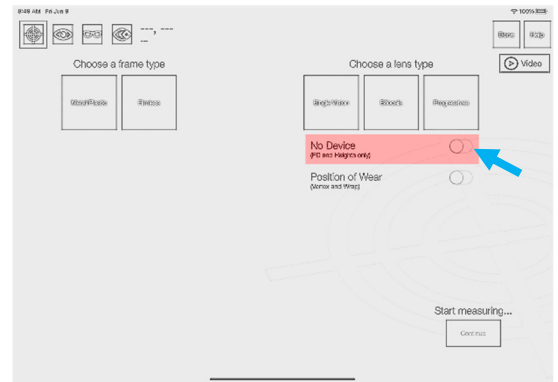

2

Capturez l'image

- 1 Placez le client dans sa posture naturelle en utilisant les techniques standards de mesure.
Assurez-vous que le client maintienne sa posture naturelle tout au long du processus de capture d'image.
- 2 Tenez la tablette verticalement devant le visage du client tout en veillant à ce qu'il maintienne sa posture. Vérifiez l'indicateur d'inclinaison de l'iPad pour vous assurer que l'inclinaison se trouve dans la zone verte.
- 3 Assurez-vous que la ligne horizontale est alignée avec le centre des pupilles du client, et que les montures remplissent le rectangle bleu.
- 4 Demandez au client de regarder dans l'objectif de la caméra et d'attendre le flash. Appuyez pour capturer l'image.

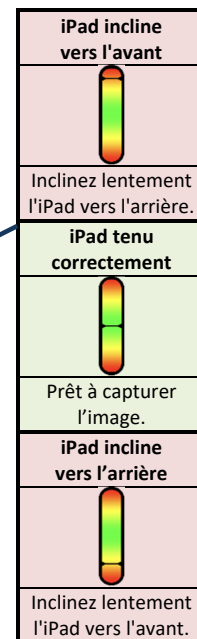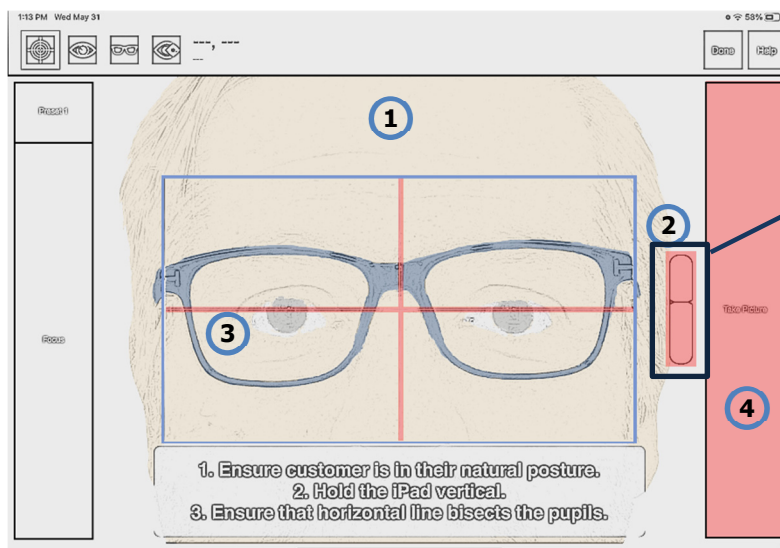

Une fois que l'image a été capturée, si les repères sur l'image ne sont pas automatiquement positionnés, il n'est pas nécessaire de reprendre l'image. Placez manuellement les repères à leurs positions respectives telles qu'indiquées dans l'étape suivante.

3

Désignez le contour des verres

Placez les lignes verticales et horizontales autour de leurs verres respectifs. Les lignes doivent être placées là où le verre rencontre la monture au point le plus extérieur du verre.

